





Vylife Boussignac

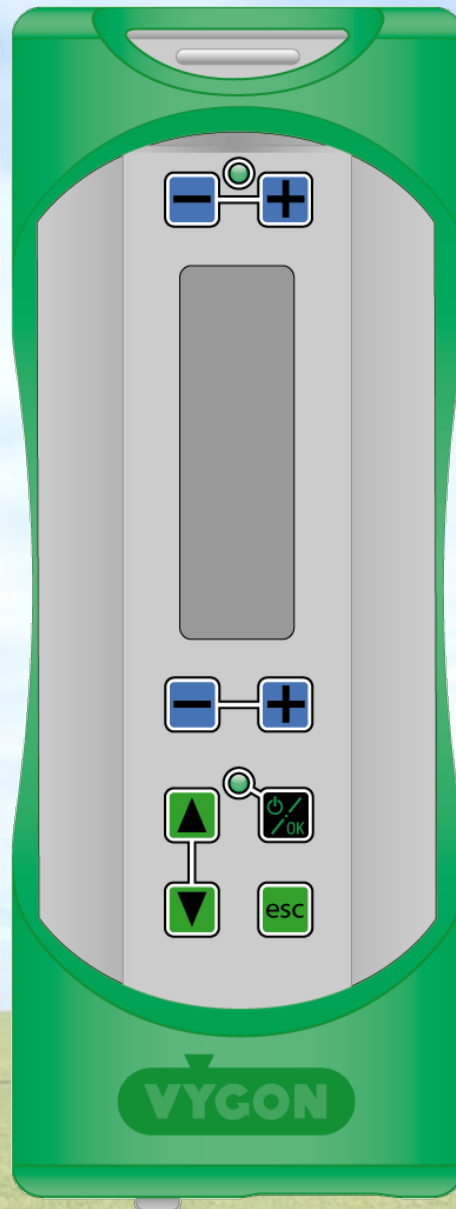




Vylife Boussignac

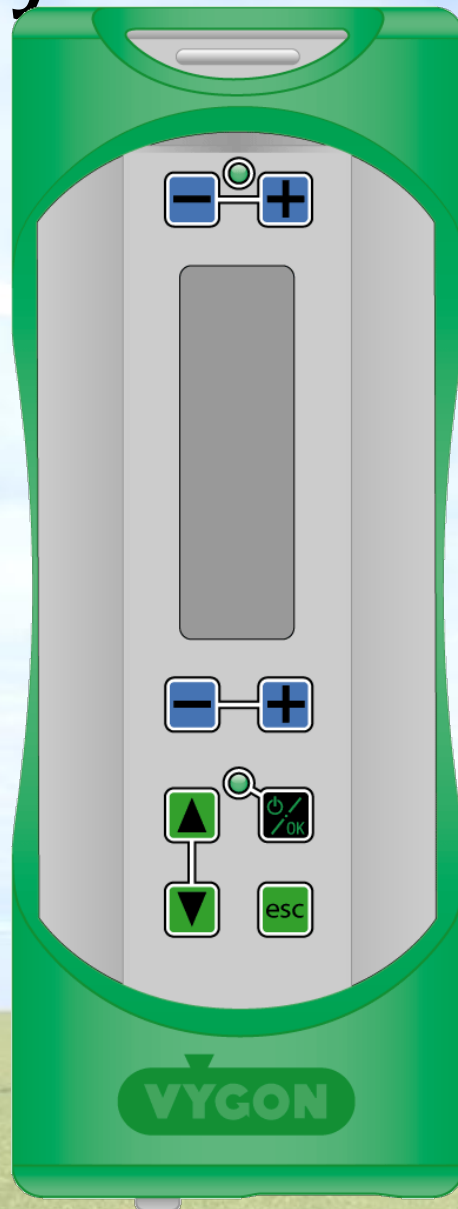

Carga de la bateria



Vylife Boussignac

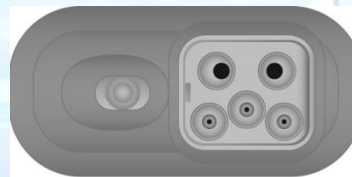

Conexión del set de uso único y oxígeno



Vylife Boussignac




Siempre conectar el set de uso
único y abrir el oxígeno
AL MAXIMO antes de encender
la Vylife





Vylife Boussignac



Una vez la Vylife está conectada al set de oxígeno, apriete sobre la tecla  durante 3 segundos

El auto test se pone en marcha para verificar que la Vylife funciona





Vylife Boussignac

¿Cómo hacer variar las presiones?



Vylife Boussignac

Reduce la presión mostrada en lo alto de la pantalla



Aumenta la presión mostrada en lo alto de la pantalla




Siempre validar la acción, si no la presión no será modificada





Vylife Boussignac

Reduce el nivel de presión mostrada en la parte baja de la pantalla EPAP o CPAP

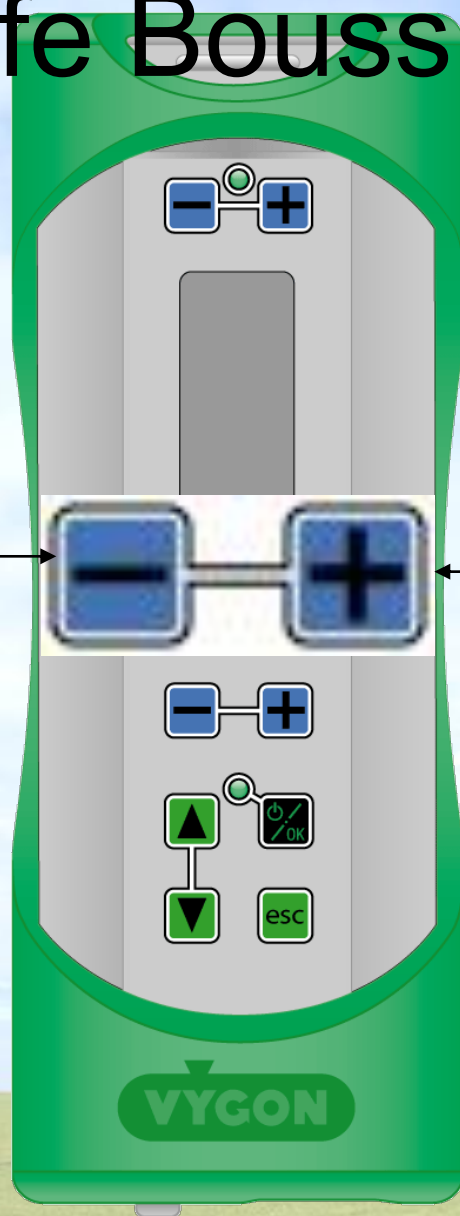


Aumenta el nivel de presión mostrada en la parte baja de la pantalla EPAP o CPAP

Siempre validar la acción, si no la presión no será modificada



Vylife Boussignac: en resumen

Dentro del uso habitual, ninguno de los reglajes son complicados! El nivel de presión es el único dato variable

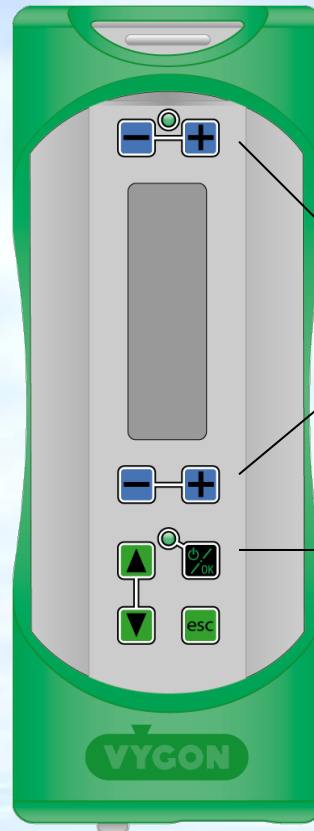

Modificación « + » o « - » de las presiones mostradas en la pantalla

Siempre validar después la acción apretando la tecla OK



Vylife Boussignac

Las informaciones visuales



Vylife Boussignac



Testigo de carga de la batería

Verde: batería llena 3 h de autonomía

Verde parpadeando: batería débil 20 min. de autonomía

Rojo: batería crítica 10 min. de autonomía

No color: no hay batería o la Vylife está apagada

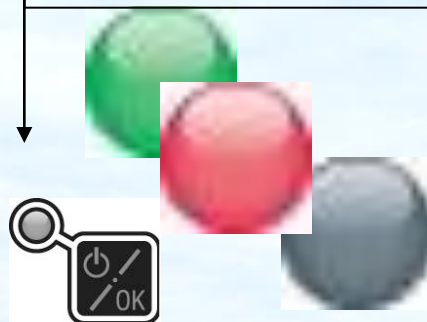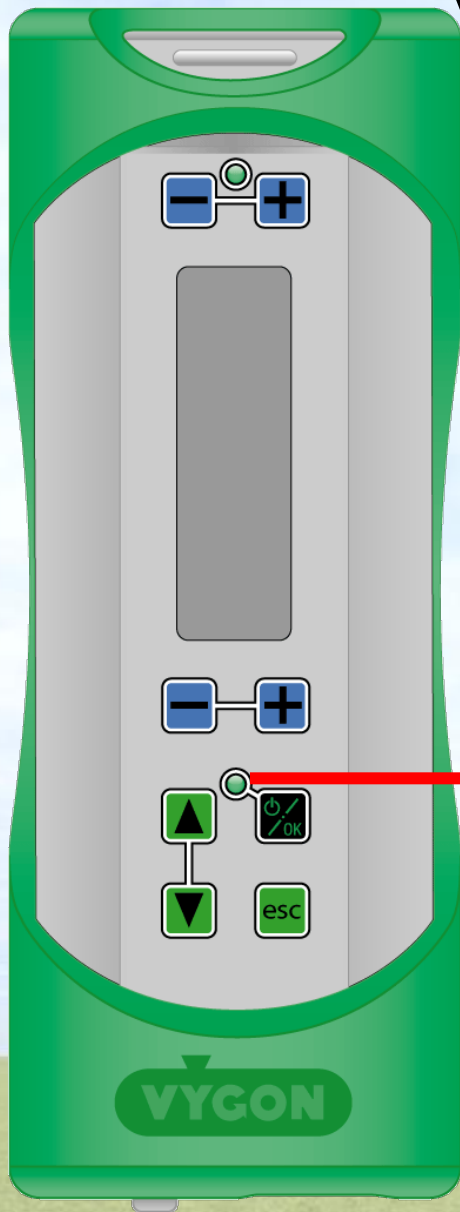




Vylife Boussignac

Testigo de ventilación:

Verde: Inspiración

Apagado: Espiración

Rojo: Alarma

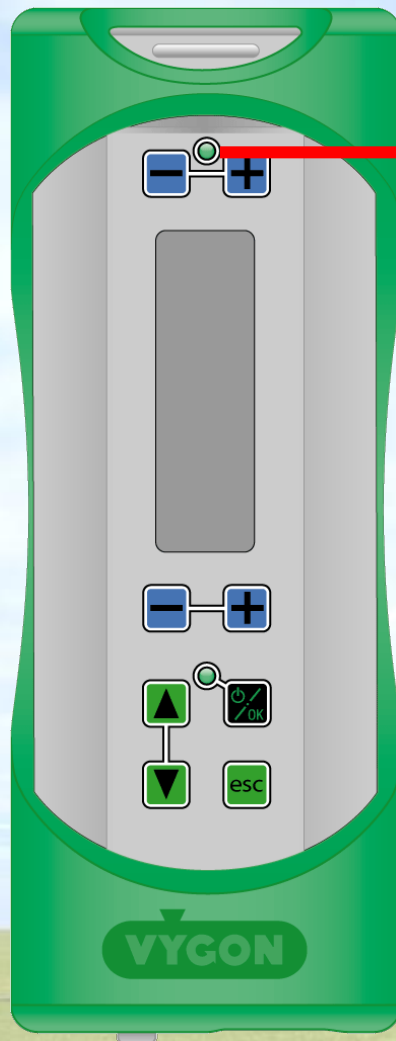



Vylife Boussignac


El menú

Vylife





Vylife Boussignac

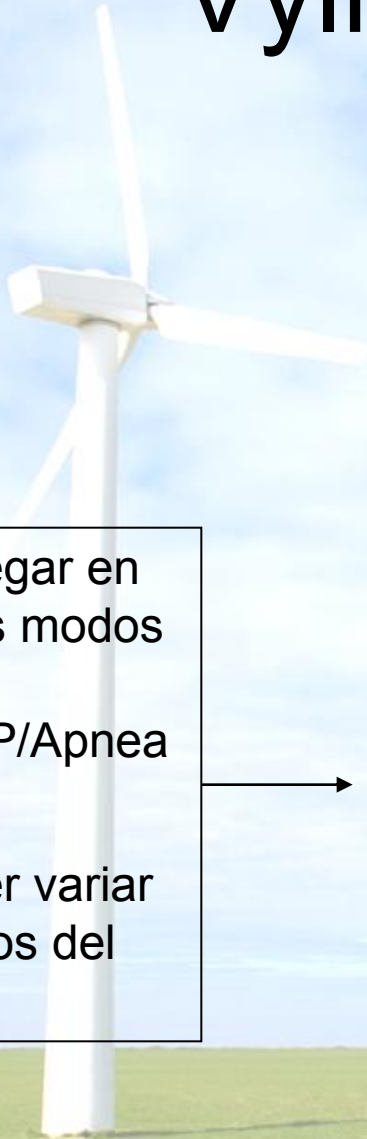

Permite navegar en los diferentes modos de Vylife (CPAP/NIV2P/Apnea / Off/ Menu)

Permite hacer variar los parametros del modo MENU




Siempre validar la acción, si no el modo no será modificado





Vylife Boussignac

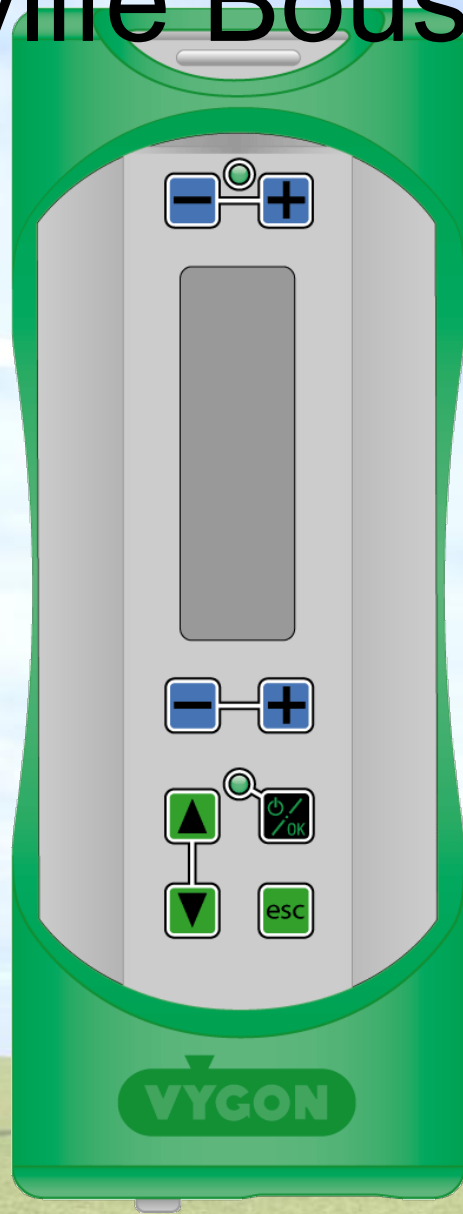

Permite salir del modo MENU



Vylife Boussignac

La pantalla

Vylife





Vylife Boussignac





Vylife Boussignac

IPAP = Inspiratory Positive Airway Pressure=18 cm H₂O

¿Cuál es el nivel de ayuda inspiratoria?


Ayuda inspiratoria = IPAP-EPAP= 18-4=14cm H₂O

EPAP = Expiratory Positive Airway Pressure=4 cm H₂O





Vylife Boussignac

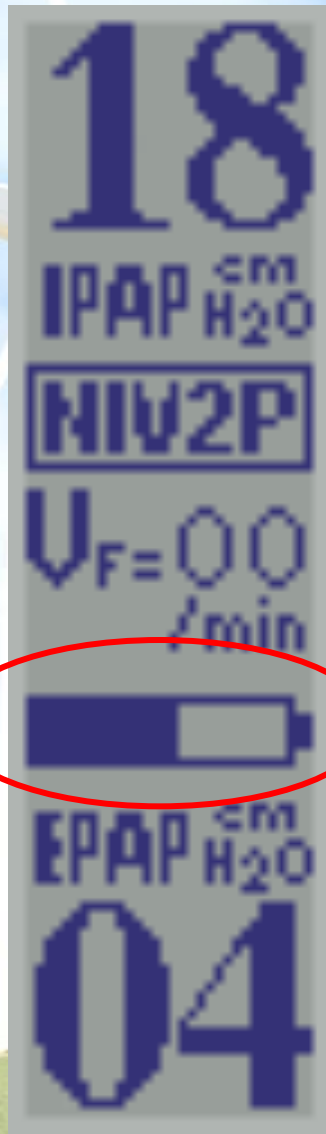


Testigo secundario de la carga de la batería





Vylife Boussignac

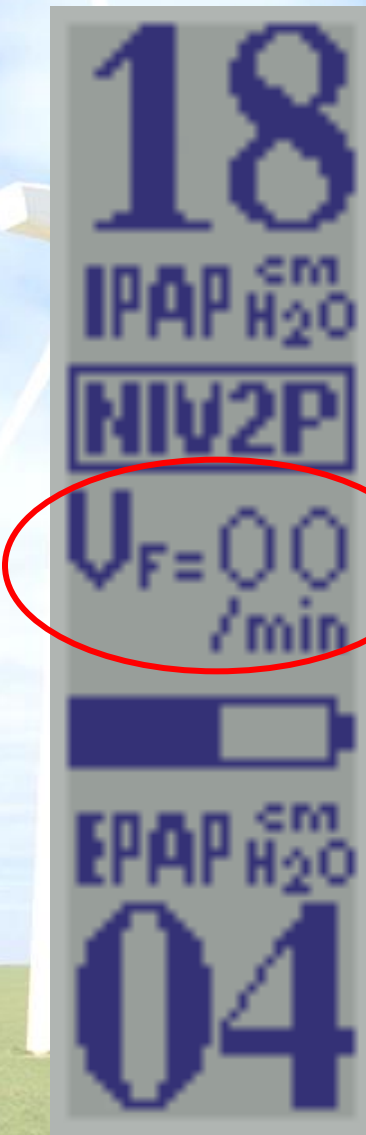

V_f = Frecuencia respiratoria por minuto





Vylife Boussignac



Apretar las teclas

Hasta el modo deseado



Después la tecla



Vuestra elección se valida





Vylife Boussignac

Resumen utilización Vylife



Vylife Boussignac

Los parámetros se actualizan en función de las necesidades del usuario


Lo que el médico va a usar todos los días

Modificación « + » o « - » de las presiones fijadas en la pantalla

Siempre validar la acción apretando la tecla OK

El modo MENU

Unica excepción: permite poner Vylife en modo OFF

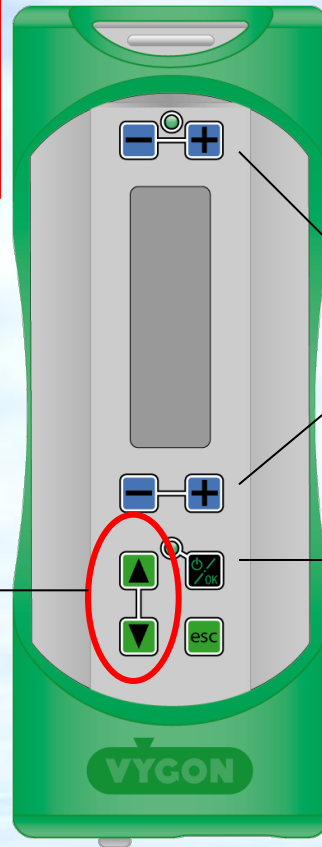







Vylife Boussignac

Ejemplo de ejercicio con Vylife






Vylife Boussignac

¿Cómo pasar de 4 a 7 cmH₂O?

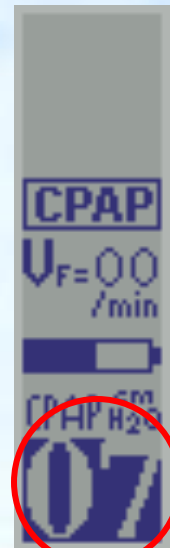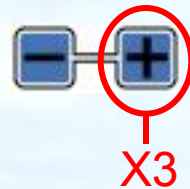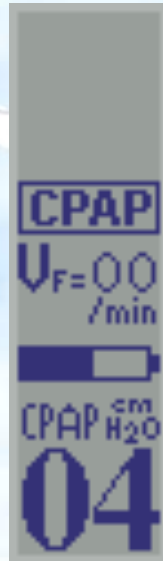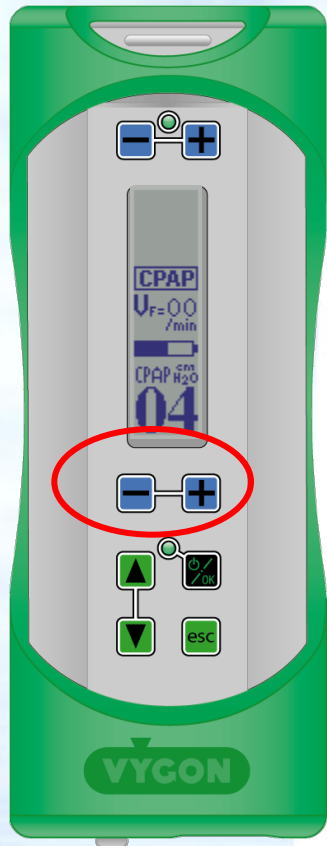

inversé

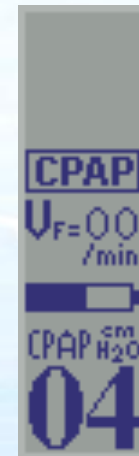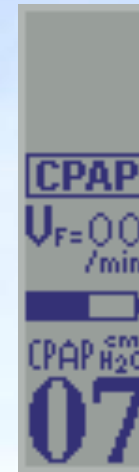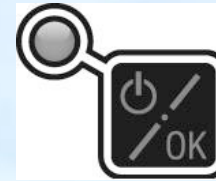




Vylife Boussignac

El modo menú de Vylife « parametraje por defecto »»



Vylife Boussignac

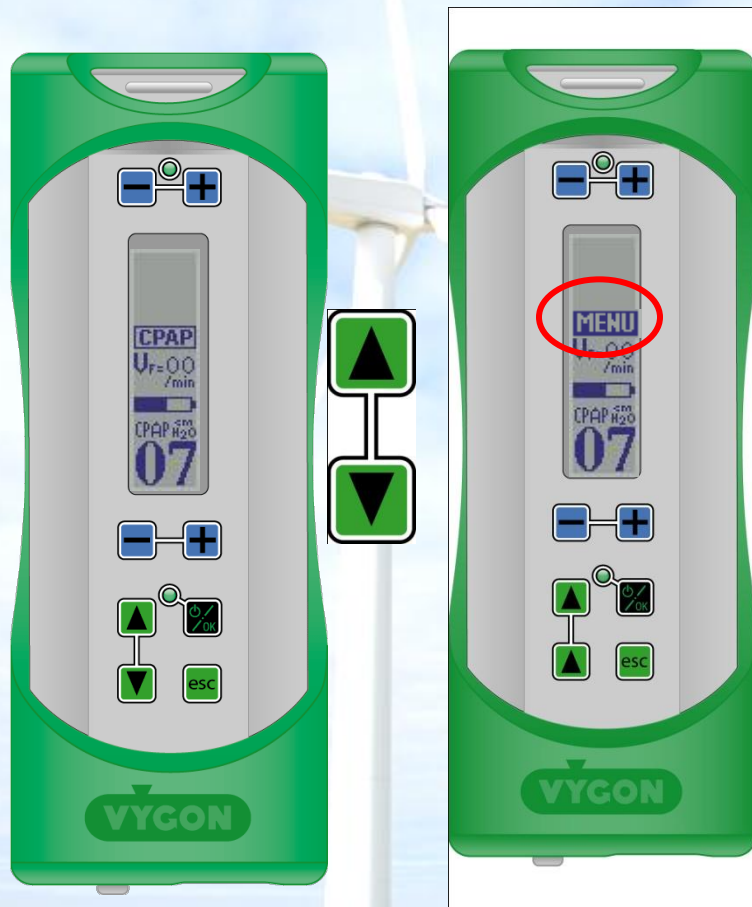

Entrez dans le mode MENU
Vous entrez dans le mode MENU

Il est paramétré par défaut la Vylife
Boussignac

Pour accéder appuyez sur la touche OK





Vylife Boussignac



Elige el nivel de CPAP por defecto y utilizando las teclas



Rango de uso de 4 a 18 cmH2O

Después valide su elección





Vylife Boussignac



Elige el nivel de EPAP por defecto usando las teclas



Zona de uso 4 cm H₂O a nivel de IPAP



Después validar su elección



Vylife Boussignac



Elige el nivel de IPAP por defecto usando las teclas



Zona de utilización
EPAP mínima en 18 cm H₂O
Después valide su elección





Vylife Boussignac



Elige la frecuencia respiratoria si pasa a modo apnea por defecto usando las teclas



Rango de uso de 5 a 30 ciclos por minuto



Después valide su elección



Vylife Boussignac



Elige la relación Ti/Te por defecto usando las teclas




Posibilidades:
3:2; 1:1; 3:4;
2:3; 1:2; 1:3;
1:4

Después valide su elección





Vylife Boussignac

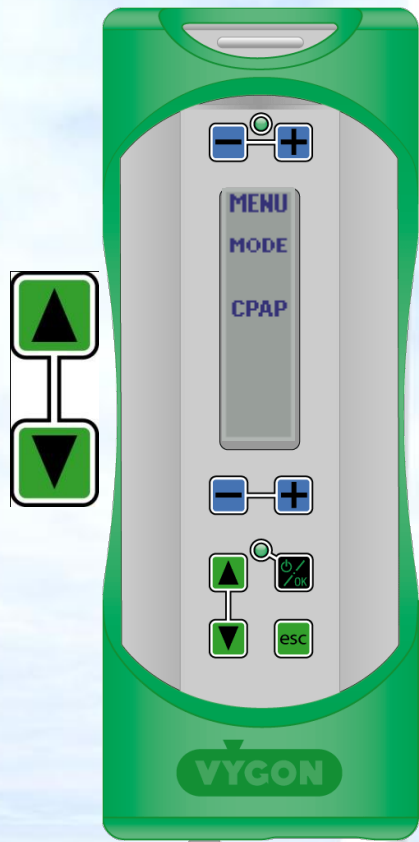

La elección del modo
arranque de Vylife
son:

CPAP
VNI2P

Utilizando las teclas




Después valide
su elección Puis
vous validez
votre choix





Vylife Boussignac

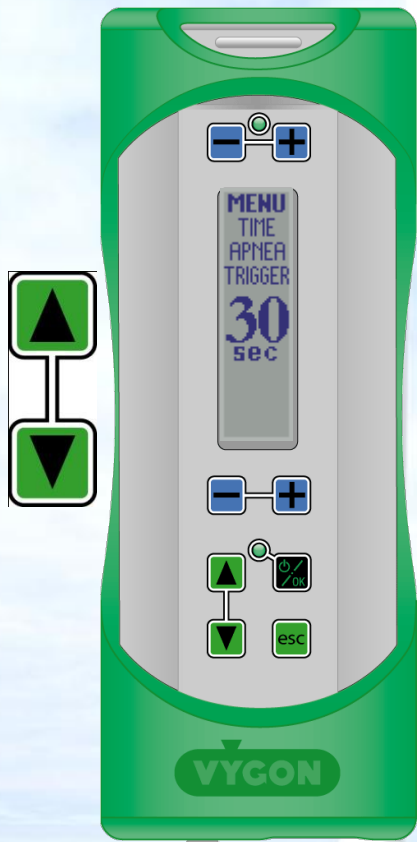

Elige el tiempo de alarma de apnea por defecto usando las teclas



Rango de uso
20 a 60 seg

Después valide su elección





Vylife Boussignac

Ejercicios Vylife



Vylife Boussignac

Ejercicio 1:

Poner Vylife en modo CPAP a 11 cm H₂O





Vylife Boussignac

Exercicio 2:

Poner Vylife en modo NIV2P

EPAP 5 cm H₂O

Ayuda de 12 cm H₂O





Vylife Boussignac

Exercicio 3:

Poner Vylife en modo off





Vylife Boussignac

Exercice 4:

Poner Vylife en modo MENU

Parametrar el MENU como sigue:

CPAP 5 cm H₂O

EPAP 6 cm H₂O

IPAP 15 cm H₂O

Frecuencia respiratoria 15/min

Ti/Te 1/3

Mode de arranque NIV 2P

Tiempo de trigger: 28 sec

Salir del menu y apagar Vylife





Vylife Boussignac

Exercice 5:

Encender Vylife

Verificar que los parámetros del ejercicio 4 están memorizados

No realizar ventilación con el balón

Verificar que la alarma se pone en acción

